

8. Bruksrelaterade risker

- Forkert storleksval (för stram / för lös)
- Forkert placering (ger ustabil pose eller tryk)
- Forkert placering av urinpåsen i lommen
- Slange klemmes eller vrides under fixering
- Brug av sliten/skadad holder
- Forkert rengöring av produkt

Risici reduceres gennem korrekt storleksval, korrekt placering, hudkontrol og regelbunden inspektion.

Disse risici minskes gennem korrekt storleksval, korrekt anvendning og regelbunden inspektion.

9. Förvaring



- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

12. Information till tillverkaren

Om du upplever en allvarlig händelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är etablerad (i Danmark är detta Läkemedelsstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk
www.caredesign.dk

Urinpåshållare

Artikelnummer: 103

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



Urinpåshållare - Care Design Artikelnummer: 103

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Care Design I/S.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktnamn: Urinpåshållare

Tillverkare: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

1. Produktbeskrivning

CARE® urinpåseholderne från Care Design er kropsbårne tekstilholdere, der anvends till säker fixering av urinpåse på låret för kateteranvändare. Kan används på henholdsvis højre og venstre lår. Designet er lavet, så plastik från urinpåsen ikke rører huden, hvilket forbedrer komfort og kan reducere risiko for hudgener. Den brede elastik sikrer, at urinpåsen ikke trækker i slang og medfører obehag, når der kommer indhold i posen. Urinpåshållarene er fremstillet i 95% bomull og 5% lycra og materialerne er Øko-TEX certificeret. Størrelser leveres från XS-XXXL.

2. Avsedd användning

Urinpåshållarene används til:

- Fiksering och stabil placering av urinpåse på låret
- Øget tryk ved bevægelse og daglig aktivitet
- Forbedret komfort vid at adskille hud og plastmateriale

Produkten används af:

- Kateteranvändare i hjemmet eller i institutionelle plejemiljøer
- Brugere med eller utan assistance från anhøriga eller vårdpersonal
- Kan för nogle mindsker gener og frustrationer, som opleves i forbindelse med pleje.

3. Indikationer och målgrupp

Urinpåshållarene er indiceret till personer med:

- Behov för säker fixering av urinpåse på benet
- Risiko för at urinpåsen ellers bevæger sig, generer, eller giver utrykthed i vardagen
- Behov för en mere hudvenlig løsning (hud skal kunne "ånde" og undgå direkte kontakt med plast)

4. Kontraindikationer och begränsningar

- Får inte användas på skadad hud, öppna sår, tryksår eller vid aktiv hudinfektion uden sundhedsfaglig vurdering.
- Får inte användas vid markante kredsløbsproblemer i benet, hvis fixering kan forværre tilstanden (vurderes sundhedsfagligt).
- Får inte användas, hvis produkten er skadad, væsentligt sliten eller ikke kan fastholde urinpåsen sikkert.
- Produktet er en fixeringsløsning og er ikke beregnet till medicinsk behandling.

5. Bruksanvisning

5.1 Före användning

- Kontrollera at urinpåseholderen er ren og intakt.
- Vælj korrekt størrelse for sikker fixering utan at stramme.

5.2 Påtagning och placering

- Placér urinpåseholderen på enten højre eller venstre lår.
- Indfør urinpåsen i lommen på urinpåseholderen og sørg for, at posen ligger stabilt og ikke vrides.
- Kontrollera at slang ikke klemmes.

5.3 Under användning

- Urinpåshållarene skal sidde fast, men komfortabelt.
- Ved obehag, føleforstyrrelser, misfarvning av hud eller irritation: stop användning og vurder passform/størrelse.

5.4 Avtagning

- Fjern holderen forsigtigt utan at trække i slang/kateter.
- Inspicer huden för trykmærker eller irritation.

6. Rengöring och underhåll

- Tvättas enligt vaskeanvisningen på produktens mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genanvendning eller förvaring.
- Inspicer regelbundet för slitage i stof/elastik og nedsat fixeringsevne.

7. Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd alltid korrekt størrelse (for stram fixering kan give obehag/tryk).
- Produktet får inte användas vid defekte syninger eller hvis fixering ikke er sikker.
- Produktet må kun används till den tilsigtede användning: fixering av urinpåse.

Symbolförklaring:

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------|---|--------------------|
|  | Varning |  | (EU) 2017/745 |  | Skydda mot solljus |
|  | Tillverkare |  | Medicinteknisk produkt |  | Läs anvisningen |