

8. Bruksrelaterade risker

Förutsebar felaktig användning omfattar:

- Sømme eller elastiker giver lokalt tryk
- Forkert passform eller storleksval
- Hudirritation
- Brug av skadad eller sliten produkt
- Forkert rengöring av produkten

Disse risiker minskas genom korrekt storleksval, korrekt användning och regelbunden inspektion.

9. Förvaring



- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

12. Information till tillverkaren

Om du upplever en allvarlig händelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är etablerad (i Danmark är detta Läkemedelsstyrelsen)



Trosor

Produktgrupp: Trosor

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk
www.caresign.dk

Trosor - Care Design produktgruppe: Trosor

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Care Design I/S.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktgrupp: Trosor

Tillverkare: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

1. Produktbeskrivning

Trosor från Care Design er udviklet som funktionelt beklædningsprodukt till daglig användning. Produkten er designet med fokus på komfort, passform och hygiejne och kan anvendes alene eller til fastholdelse av inkontinensprodukter. Trosorne er velegnede till användning i både private hjem og institutionelle plejemiljøer.

Trosorne kan fås i en herremodel (806) och en damemodel(802, 805, 808)

Trosorne kan fås i forskellige størrelser.

Materialerne er økotex-certificeret og stoffet er 95% bomull/5% lycra.

2. Avsedd användning

Trosorne används til:

- Daglig beklædning
- Komfort og beskyttelse
- Fastholdelse av evt. inkontinensprodukter

Produkten används av voksne og/eller børn, med eller utan assistance från vårdpersonal.

3. Indikationer

Trosorne er indiceret til personer med behov for:

- Komfortabel og hudvenlig beklædning
- Stabil fastholdelse av inkontinensprodukter
- Enkle løsninger til daglig på- og aftagning

4. Kontraindikationer och begränsningar

- Produkten får inte användas på skadad hud, öppna sår eller vid hudinfektioner uden forudgående sundhedsfaglig vurdering.
- Produkten er ikke absorberende och erstatter ikke inkontinensprodukter. (Model 808 har en absorberende uppsugningsförmåga på 90 ml)
- Får inte användas, hvis produkten er skadad eller væsentligt sliten.

5. Bruksanvisning

5.1 Före användning

- Kontrollera, at trosorne er rene och intakte.
- Vällj korrekt størrelse for optimal passform och komfort.
- Läs denne användningsanvisning inden første användning.

5.2 Påtagning

- Tag trosorne på som almindeligt undertøj.
- Sørg for, at de sidder tæt, men komfortabelt, utan at stramme.
- Hvis inkontinensprodukt anvendes, placeres dette korrekt før påtagning.

5.3 Under användning

- Trosorne kan bæres i vardagen och om natten efter behov.
- Ved ubehag, hudirritation eller felaktig passform skal användningen opphøre.
- Opsyn anbefales vid användning hos personer med nedsat funktionsevne.

5.4 Aftagning

- Trosorne tages av som almindeligt undertøj.
- Undgå unødig belastning av hud och led vid aftagning.

6. Rengöring och underhåll

- Tvättas enligt vaskeanvisningen på produktens mærkat.
- Produktene skal være helt tørt før genanvändning eller förvaring.
- Inspicer regelbundet för tegn på slitage, særligt vid elastiker och sømme.

7. Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd alltid korrekt størrelse.
- Fortsat användning av sliten produkt kan reducere komfort och funktion.
- Produktene må kun anvendes til den tilsigtede användning beskrevet i denne användningsanvisning.

Symbolförklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot solljus
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Läs anvisningen