

8. Bruksrelaterade risker

- Forkert storleksval (för stram / för lös)
- Forkert placering (ger ustabil pose eller tryk)
- Forkert placering av urinpåsen i lommen
- Slange klemmes eller vrides under fixering
- Brug av sliten/skadad holder
- Forkert rengöring av produkt

Risici reduceres gennem korrekt storleksval, korrekt placering, hudkontrol og regelbunden inspektion.

Disse risici minskes gennem korrekt storleksval, korrekt anvendning og regelbunden inspektion.

9. Förvaring



- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

12. Information till tillverkaren

Om du upplever en allvarlig händelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är etablerad (i Danmark är detta Läkemedelsstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk
www.caresign.dk



Urinpåshållare

Artikelnummer: 104

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



Urinpåshållare - Care Design Artikelnummer: 104

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Care Design I/S.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktnamn: Urinpåshållare

Tillverkare: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

1. Produktbeskrivning

CARE® urinpåseholdere från Care Design er kropsbårne tekstilholdere, der anvendes till säker fixering av urinpåse på vadgen för kateteranvändare. Designet er lavet, så plastik från urinpåsen ikke rører huden, hvilket forbedrer komfort og kan reducere risiko for hudgener. Den brede elastik sikrer, at urinpåsen ikke trækker i slang og medfører ubehag, når der kommer indhold i posen.

Urinpåshållarene er fremstillet i 95% bomull og 5% lycra og materialerne er Øko-TEX certificeret. Størrelser leveres från XS-XXXL.

2. Avsedd användning

Urinpåshållarene används til:

- Fiksering og stabil placering av urinpåse på vadgen. (Henholdsvis højre eller venstre ben)
- Øget tryk ved bevægelse og daglig aktivitet
- Forbedret komfort ved at adskille hud og plastmateriale

Produkten används af:

- Kateteranvändare i hjemmet eller i institutionelle plejemiljøer
- Model 104 er særligt egnet til kørestolsanvändare eller stillesiddende användare
- Brugere med eller utan assistance från anhöriga eller vårdpersonal
- Kan för nogle mindske gener og frustrationer, som opleves i forbindelse med pleje.

3. Indikationer og målgruppe

Urinpåshållarene er indiceret til personer med:

- Behov för säker fixering av urinpåse på benet
- Risiko för at urinpåsen ellers bevæger sig, generer, eller giver utryk i vardagen
- Behov för en mere hudvenlig løsning (hud skal kunne "ånde" og undgå direkte kontakt med plast)

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Får inte användas på skadad hud, öppna sår, tryksår eller vid aktiv hudinfektion uden sundhedsfaglig vurdering.
- Får inte användas vid markante kredsløbsproblemer i benet, hvis fixering kan forværre tilstanden (vurderes sundhedsfagligt).
- Får inte användas, hvis produkten er skadad, væsentligt sliten eller ikke kan fastholde urinpåsen sikkert.
- Produktet er en fixeringsløsning og er ikke beregnet til medicinsk behandling.

5. Bruksanvisning

5.1 Førre anvendning

- Kontrollera at urinpåseholderen er ren og intakt.
- Vælj korrekt størrelse för sikker fixering utan at stramme.

5.2 Påtagning og placering

- Placér urinpåseholderen på vadgen. (Henholdsvis højre eller venstre ben)
- Indfør urinpåsen i lommen på urinpåseholderen og sørg for, at posen ligger stabilt og ikke vrides.
- Kontrollera at slangr ikke klemmes.

5.3 Under anvendning

- Urinpåshållareen skal sidde fast, men komfortabelt.
- Ved ubehag, føleforstyrrelser, misfarvning av hud eller irritation: stop anvendning og vurder passform/størrelse.

5.4 Aftagning

- Fjern holderen forsigtigt utan at trække i slang/kateter.
- Inspicer huden för trykmærker eller irritation.

6. Rengøring og underhold

- Tvættes enligt vaskeanvisningen på produktens mærkat.
- Produktet skal være helt tørt før genanvendning eller förvaring.
- Inspicer regelbundet för slitage i stof/elastik og nedsat fixeringsevne.

7. Varnings og forsigtighedsåtgærd

- Använd alltid korrekt størrelse (för stram fixering kan give ubehag/tryk).
- Produktet får inte användas vid defekte syninger eller hvis fixering ikke er sikker.
- Produktet må kun används till den tilsigtede anvendning: fixering av urinpåse.

Symbolforklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot sollys
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Läs anvisningen