

Rengöring och underhåll

- Skonsam tvätt vid 30 °C
- Får ej blekas
- Får ej torktumlas
- Får ej strykas
- Får ej kemtvättas
- Inget sköljmedel
- Forma produkten och låt lufttorka
- Skyddas mot direkt solljus och värme



Livslängd

Produktens förväntade livslängd beror på naturligt slitage vid korrekt och indicerad användning

Rapportering av allvarliga händelser (Vigilance)

Varje allvarlig händelse eller försämring av hälsotillstånd i samband med användning av produkten ska rapporteras till:

- Distributör eller tillverkare
- Relevant nationell behörig myndighet (I Danmark: Läkemedelsstyrelsen)

Kassering

Produkten ska kasseras i enlighet med lokala avfallsregler efter användning.

Överensstämmelse

Produkten överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 (MDR).

Aktuell försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

Dansk distributör

CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk
www.caredesign.dk



BORT Medical GmbH

Am Schweizerbach 1
71384 Weinstadt-Benzach-DE
Telefon: +49 - 71 51 - 9 92 00 - 0

E-mail: medical@bort.com
www.bort.com



Albuestøtte, kompressionsbind

Artikelnummer: 054200
XS, S, M, L, XL

BORT Albuestøtte, kompressionsbind - Care Design artikelnummer: 054200

Tak for ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från BORT GmbH.



Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta din läkare eller den specialbutik där du har köpt produkten.

Syfte

Dette medicinske udstyr er en armbåge-kompressionsbandage fremstillet af tovejs-elastisk materiale, beregnet till cirkulær kompression av bløddelene omkring armbågeleddet.

Medicinteknisk produkt – klass I

En patient – flergålsanvändning

Indikationer

Produkten er indiceret till användning ved:

- Kroniske bløddelsirritationer i armbågeområdet
- Posttraumatiske tilstande
- Postoperative tilstande
- Ledansamling (ledansamling/ledudgydning)
- Distorsion (forstuvning)
- Artrose
- Kontusion (slag/skade)

Kontraindikationer

Produkten får inte användas vid:

- Perifer arteriel okklusiv sygdom (PAVK)
- Lymfedrænageforstyrrelser, herunder uklare bløddelshævelser distalt for användningsområdet
- Sensoriske eller kredsløbsmæssige forstyrrelser i det behandlede kropsområde
- Hudsygdomme i det behandlede område

Användningsrisker / Viktiga anmärkningar

- Dette produkt er medicinsk udstyr. Anvendelse og varighed skal aftales med fackpersonal. Valg av korrekt storlek och instruktion foretages av fackpersonal.
- Produktet ska tas av före radiologiska undersökningar
- Produktet bør fjernes under længere hvileperioder, f.eks. under søvn
- Ved følelseløshed skal bandagen løsnes eller fjernes
- Ved vedvarende gener skal lækare eller faghandel kontaktes
- Produktet får endast användas i enlighet med indikationen
- Samtidig användning av andre produkter må kun ske efter aftale med lækare
- Produktet får inte modifieras
- Får inte användas på öppna sår
- Får inte användas vid intolerance over for ett av de anvænde materialer
- Produktet får inte genanvænds till andre patienter
- Under användning må der ikke anvænds cremer eller salver i anvændsområdet, da dette kan beskadige materialet

Påtagning

Bandagen påføres således, at det farvemæssigt markerede område er placeret over armbågen. Den bredere åbning (markeret med tekstiletiketten) skal vende mod overarmen, og den mindre åbning mod underarmen.

Avtagning

Tag fat i bandagens nederste kant och træk bandagen av over underarmen i retning mod hånden.

Materialsammansättning

- Polyamid (PA)
- Elastan (EL)
- Den præcise materialesammensætning fremgår av den isyede tekstiletiket.

Symbolförklaring:

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------|---|--------------------|
|  | Varning |  | (EU) 2017/745 |  | Skydda mot solljus |
|  | Tillverkare |  | Medicinteknisk produkt |  | Läs anvisningen |