

8. Bruksrelaterade risker

Förutsebar felaktig användning omfattar:

- Manglende lukning av tryckknappar
- Forkert storleksval
- Bruk av skadad eller sliten produkt
- Forkert rengöring av produkten

Disse risiker minskas genom korrekt storleksval, korrekt användning och regelbunden inspektion.

9. Förvaring



- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

12. Information till tillverkaren

Om du oplever en alfarlig hændelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behøriga myndigheden i det land där anvønderen/patienten er etableret (i Danmark er dette Løkemedelstyrelsen)



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caresign@caresign.dk
www.caresign.dk

Undertrøja med tryklukning

Artikelnummer: 201

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Undertrøje - Care Design Artikelnummer: 201

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Care Design I/S.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktnamn: Undertrøje med trykknapper

Tillverkare: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

1. Produktbeskrivning

Undertrøjer med trykknapper från Care Design er funktionelle undertrøjer designet med trykknapper ned midtfor foran, som muliggør nem og skånsom på- og aftagning. Produkten er udviklet med fokus på komfort, funktionalitet og værdighed og er særligt velegnet till anvendning i pleje- og omsorgssituationer.

Produkt kan fås i en herremodel och en damemodel.

Produkt kan fås i forskellige størlekr.

Materiale er økotex- certificeret 95% bomull/5 % lycra samt trykknapper.

2. Avsedd anvendning

Undertrøjerne anvendes som daglig beklædning til:

- Komfort och värme
- Lettere på- och aftagning vid personlig pleje
- Reduceret fysisk belastning for anvandere og vårdpersonal
- Kan for nogle mindske gener och frustrationer som opleves i forbindelse med pleje.

Produkten er beregnet till anvendning av børn och voksne med eller utan assistance från anhöriga eller vårdpersonal, i private hjem och institutionelle plejemiljøer.

3. Indikationer och målgrupp

Undertrøjen med tryklukning fortil er fremstillet till gigtpatienter eller till personer med funktionsnedsættelse av andre årsager.

Undertrøjen er indiceret till personer med:

- Nedsat mobilitet
- Begrænset arm- eller skylarfunktion
- Behov for beklædning, der kan tages av och på utan fuld overkropsafklædning
- Behov for forenklet håndtering i plejesituationer

4. Kontraindikationer och begrænsninger

- Produkten får inte användas på skadad hud, öppna sår eller vid hudinfektioner uden forudgående sundhedsfaglig vurdering.
- Produkten har ingen terapeutisk eller absorberende funktion.
- Får inte användas, hvis trykknapper eller materiale er skadad eller væsentligt sliten.

5. Bruksanvisning

5.1 Før anvendning

- Kontrollere, at undertrøjen er ren och intakt.
- Vælj korrekt størlekr for optimal passform och komfort.
- Læs denne anvendningsanvisning inden første anvendning.

5.2 Påtagning

1. Åbn alle trykknapper.
2. Placer undertrøjen omkring overkroppen i korrekt position.
3. Luk trykknapperne
4. Sørg for, at undertrøjen sidder tæt, men komfortabelt, utan at stramme.

5.3 Under anvendning

- Undertrøjen kan bæres i vardagen och om natten efter behov.
- Ved ubehag, hudirritation eller felaktig passform skal anvendningen uophøre.

5.4 Aftagning

- Åbn trykknapperne forsigtigt.
- Fjern undertrøjen utan at belaste anvandarens skuldre, arme eller hud.

6. Rengøring och underhåll

- Tvættes enligt vaskeanvisningen på produktens mærkat.
- Produkten skal være helt tørt før genanvendning eller förvaring.
- Inspicer regelbundet for slitage på stof, sømme och trykknapper.

7. Varnings och försigtighedsåtgärder

- Använd alltid korrekt størlekr.
- Trykknapper skal være korrekt lukkede før anvendning.
- Fortsat anvendning av sliten produkt kan nedsætte funktion och komfort.
- Produkten må kun anvendes till den tilsigtede anvendning beskrevet i denne anvendningsanvisning.

Symbolförklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot solljus
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Läs anvisningen