

### 8. Bruksrelaterede risiker

Føretsebar felektig anvendning omfatter:

- Forkert storleksval
- Brug av skadad produkt

Disse risiker minskas genom korrekt storleksval, korrekt anvendning og regelbunden inspektion.

### 9. Förvaring



- Förvaras torr og rent
- Skyddas mot direkt solljus og varme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

### 10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt restaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

### 11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress og kontaktoppgifter.

### 12. Information till tillverkaren

Om du opplever en allvarlig hendelse i samband med anvendning av produktene, kontakta tillverkaren og den behørlige myndigheten i det land där anvendaren/patienten är etablerad (i Danmark är dette Läkemedelsstyrelsen)



**CARE® Design**

Englandsvej 8  
5700 Svendborg-DK  
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: [caredesign@caredesign.dk](mailto:caredesign@caredesign.dk)  
[www.caredesign.dk](http://www.caredesign.dk)

## Badebleer / svømmebleer

Artikelnummer: Swim-MED

S, M, L, XL, XXL



## Badbløjor / simbløjor - Care Design artikelnummer: Swim-Med

Tack för din tillid till ett medicinsk udstyr från Principle Business Enterprises.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktnamn: Swim-Med

Tillverkare: Principle Business Enterprises:

20189 Pine Lake Road, Bowling Green, OH 43402, P.O. Box 129 Dunbridge, OH 43414, USA

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

### 1. Produktbeskrivning

Swim-Med er en badeble till personer med inkontinens. Produktens er udviklet till användning ved svømning og vandaktiviteter og har till formål at reducere risikoen for uønsket udslip af urin og afføring under ophold i vand.

Der er en barriere på ydersiden, der sikrer at badebleen ikke suger væske udefra og derfor ikke øger dets volumen under vandaktiviteter.

Der er en blå kant i taljen, der indikerer at det er bagsiden af badebleen.

Latexfri. Kan anvendes af både mænd og kvinder.

### 2. Avsedd användning

Swim-Med används som badeble ved:

- Svømning
- Vandtræning
- Ophold i svømmehal eller lignende miljøer

Øger trykningen under vandaktivitet, da badebleen sikrer at hverken urin eller afføring kan komme ud i vandet.

Skydder badetøjet som anbefales at anvende udover badebleen.

Produkten anvendes af:

- Barn og voksne med inkontinens
- Brugere med eller uden assistance fra anførte eller plejepersonal

### 3. Indikationer

Swim-Med er indiceret til brug for personer med urin- og afføringsinkontinens og som ønsker at deltage i vandaktiviteter på en hygiejnisk og værdig måde.

### 4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produktet er ikke beregnet til at anvende som erstatning for inkontinensprodukter uden for vand.
- Får ikke anvendes ved åbne sår eller hudinfektioner i det dækkede område uden forudgående vurdering.
- Produktet er ikke beregnet til kontinuerlig brug uden for vandaktiviteter.

## 5. Bruksanvisning

### 5.1 Før brug

- Kontroller at Swim-Med er intakt og uden synlige skader.
- Vælg korrekt størrelse for at sikre optimal pasform og tæthed.
- Sørg for, at produktet er rent og tørt før brug.

### 5.2 Påtagning

- Tag Swim-Med på som en almindelig bukseble eller underbukser.
- Sørg for, at elastiker i talje og ben sidder tæt, men komfortabelt.
- Kontroller, at produktet slutter korrekt til kroppen uden folder.

### 5.3 Under brug

- Produktet skal bæres under hele opholdet i vand.
- Ved ubehag eller felaktig pasform skal brugen stoppes, og produktet justeres eller udskiftes.
- Opsyn anbefales ved brug hos børn eller personer med nedsat funktionsevne.

### 5.4 Efter brug

- Fjern Swim-Med umiddelbart efter vandaktivitet.
- Swim-Med er en engangs badeble og skal derfor kasseres efter endt vandaktivitet.
- Kasseres i almindelig restaffald.

## 6. Rengøring og underhold

- Swim-Med er en engangs badeble og skal derfor kasseres efter endt vandaktivitet.
- Kasseres i almindelig restaffald.
- Derfor ingen rengøring eller underhold.

## 7. Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd alltid korrekt størrelse for at sikre tæthed og funktion.
- Produktet får ikke anvendes, hvis det er skadet eller sløset.
- Swim-Med reducerer risiko for udslip, men kan ikke garantere fuldstændig tæthed under alle forhold.
- Må kun anvendes til den tilsigtede brug beskrevet i denne brugsanvisning.

## Symbolforklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot solljus
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Läs anvisningen