

### Rengöring och underhåll

- Skonsam tvätt vid 30 °C
- Får ej blekas
- Får ej torktumlas
- Får ej strykas
- Får ej kemtvättas
- Inget sköljmedel
- Forma produkten och låt lufttorka
- Skyddas mot direkt solljus och värme



### Livslängd

Produktens förväntade livslängd beror på naturligt slitage vid korrekt och indexerad användning

### Rapportering av allvarliga händelser (Vigilance)

Varje allvarlig händelse eller försämring av hälsotillstånd i samband med användning av produkten ska rapporteras till:

- Distributör eller tillverkare
- Relevant nationell behörig myndighet (I Danmark: Läkemedelsstyrelsen)

### Kassering

Produkten ska kasseras i enlighet med lokala avfallsregler efter användning.

### Överensstämmelse

Produkten överensstämmer med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 (MDR).

Aktuell försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

### Dansk distributör

**CARE® Design**

Englandsvej 8  
5700 Svendborg-DK  
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: [caredesign@caredesign.dk](mailto:caredesign@caredesign.dk)  
[www.caredesign.dk](http://www.caredesign.dk)



**BORT Medical GmbH**

Am Schweizerbach 1  
71384 Weinstadt-Benzach-DE  
Telefon: +49 - 71 51 - 9 92 00 - 0

E-mail: [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)  
[www.bort.com](http://www.bort.com)



## ActiveColor Sports knästøtte

Artikelnummer: 1440SP

S, M, L, XL, XXL



## BORT ActiveColor Sports knæstøtte - Care Design artikelnummer: 1440SP

Tak for ditt førtroende for en medicinteknisk produkt från BORT GmbH.



Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta din läkare eller den specialbutik där du har köpt produkten.

### Syfte

Dette medicinske udstyr er en knæbandage till kompression av blødt væv.

Medicinteknisk produkt - klass I

En patient - flergåningsanvändning

### Indikationer

Produkten er indiceret till användning ved:

- Profylakse mod overbelastning
- Forstrækning
- Forstuvninger
- Belastningsudløste irritationstilstande

### Kontraindikationer

Produkten får inte användas vid:

- Øget risiko for trombose
- Svær varikosis
- Perifer arteriel okklusiv sygdom (PAVK)
- Lymfedrænageforstyrrelser, herunder uklare bløddelshævelser distalt for det anlagte hjælpemiddel
- Sensoriske eller kredsløbsmæssige forstyrrelser i det behandlede kropsområde
- Hudsygdomme i det behandlede kropsområde

### Användningsrisker / Viktiga anmärkningar

- Dette produkt er medicinsk udstyr. Anvendelse og varighed skal aftales med fackpersonale. Valg av korrekt storlek och instruktion foretages av fackpersonale.
- Produktet ska tas av före radiologiska undersökningar
- Produktet bør fjernes under længere hvileperioder, f.eks. under søvn
- Ved følelseløshed skal bandagen løsnes eller om nødvendigt fjernes
- Ved vedvarende gener skal lækare eller faghandel kontaktes
- Produktet får endast användas i enlighet med indikationen
- Samtidig användning av andre produkter må kun ske efter aftale med lækare
- Produktet får inte modifieras
- Får inte användas på öppna sår
- Får inte användas vid intolerance over for ett av de anvænde materialer
- Produktet får inte genanvænds till andre patienter
- Under användning må der ikke anvænds cremer eller salver i området, hvor bandagen er anlagt, da dette kan beskadige materialet

### Påtagning

- Fold velcrobåndet udad, och tag fat i bandagens øverste kant.
- Træk bandagen over foden och op till knæet.
- Fold velcrobåndet tilbage mod benet, så silikonenopperne ligger direkte mod huden.

### Avtagning

For at fjerne bandagen foldes velcrobåndet udad. Tag fat i bandagens nederste kant och træk bandagen ned over foden.

### Materialsammansättning

Polyamid (PA), elastan (EL)

Den præcise materialesammensætning fremgår af den isyede tekstiletiket.

### Symbolforklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot solljus
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Läs anvisningen