

8. Bruksrelaterede risiker

Føretsebar felektig anvendning omfatter:

- Manglende lukning av tryckknapper
- Trykknapper eller dragkedjer svigter under anvendning
- Forkert storleksval
- Hudirritation
- Bruk av skadad eller sliten produkt
- Forkert rengøring av produkten

Disse risiker minskas genom korrekt storleksval, korrekt anvendning och regelbunden inspektion.

9. Förvaring



- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmærkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

12. Information till tillverkaren

Om du upplever en allvarlig händelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är etablerad (i Danmark är detta Läkemedelsstyrelsen)



Bodystockings

Produktgrupp: Bodystockings



CARE® Design

Englandsvej 8

5700 Svendborg-DK

Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk

www.caredesign.dk

XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



Care Design produktgruppe: Bodystockings

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Care Design I/S.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktgrupp: Bodystockings

Tillverkare: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

1. Produktbeskrivning

Bodystockings från Care Design er specialudviklet beklædning med lukninger (tryckknapper og dragkedjor), der er designet till at give komfort, støtte og fastholdelse av evt. inkontinensprodukter. Produkt er udviklet till at lette på- og aftagning samt pleje i vardagen og bidrage till øget værdighed for anvænderen.

Produkterne er uni-sex modeller og kan derfor anvænds av både mænd og kvinder. Materialerne er økotex-certificeret og dermed meget hudvenlige og behagelige at anvende. Stoffet er henholdsvis 95% bomull/5% lycra og 100% bomull.

2. Avsedd användning

Bodystockings används som dagligt beklædningsprodukt till:

- Komfort og varme
- Fastholdelse av inkontinensprodukter
- Lettere på- og aftagning i plejesituationer
- Skyddede mod at gøre skade på sig selv hos borgere med særlige behov
- Kan för nogle mindske gener og frustrationer som opleves i forbindelse med pleje.

Produkten används af:

- Barn og voksne med inkontinens
- Brugere med eller utan assistance från anhöriga eller vårdpersonal i private hjem og institutionelle plejemiljøer.

3. Indikationer og målgruppe

Bodystockings er indiceret till personer med:

- Nedsat mobilitet
- Behov för støtte till fastholdelse av beklædning eller inkontinensprodukter
- Behov för lettere håndtering vid personlig pleje
- Særlige behov för ikke ubevidst at gøre skade på sig selv (kradsning, fjernelse av katerer, sonde, fjernelse av ble mm)

4. Kontraindikationer og begrænsninger

- Produkt er ikke anvænds på skadet hud eller åbne sår utan sundhedsfaglig vurdering.
- Produkt er ikke beregnet till medicinsk behandling eller absorption av væsker. Får inte användas, hvis produkt er skadet eller væsentligt sliten.

5. Bruksanvisning

5.1 Førre anvændning

- Kontrollere, at bodystocking er ren og intakt.
- Vælg korrekt størrelse för optimal passform og komfort.
- Læs denne anvændningsanvisning inden første anvændning.

5.2 Påtagning

- Åbn alle lukninger (tryckknapper, dragkedjor).
- Tag bodystocking på som almindeligt undertøj, alt efter hvor åbningen er.
- Luk tryckknapper og dragkedjor i korrekt rækkefølge.
- Sørg for, at produkt sidder tæt, men komfortabelt, utan at stramme.

5.3 Under anvændning

- Produkt kan bæres i vardagen og om natten, alt efter behov.
- Ved ubehag, hudirritation eller felaktig passform skal anvændningen upphøre.

5.4 Aftagning

- Åbn lukningerne forsigtigt (tryckknapper, dragkedjor)
- Fjern bodystocking utan at belaste anvænderens led eller hud.

6. Rengøring og underhåll

- Tvættes enligt vaskeanvisningen på produktens mærkat.
- Produkt skal være helt tørt før genanvændning eller förvaring.
- Inspicer regelbundet för slitage på stof, sømme og lukninger.

7. Varnings og försigtighedsåtgærd

- Anvænd altid korrekt størrelse.
- Produkt får inte användas, hvis lukninger eller sømme er skadet.
- Fortsat anvændning av sliten produkt kan nedsætte funktion og komfort.

Produkten må kun används till den tilsigtede anvændning.

Symbolförklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot solljus
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Läs anvisningen