

CARE® Desian

Bruksanvisning

8. Bruksrelaterade risker

Förutsebar felaktig användning omfattar:

- Fel storleksval
- Användning av skadad produkt

Dessa risker minskas genom korrekt storleksval, korrekt användning och regelbunden inspektion.

9. Förvaring



- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när den inte används

10. Kassering

Produkten kan kasseras som vanligt restavfall i enlighet med lokala riktlinjer.

11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

12. Information till tillverkaren

Om du upplever en allvarlig händelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är etablerad (i Danmark är detta Läkemedelsstyrelsen)



Badblöjor / simblöjor

Artikelnummer: Swim-MED

S, M, L, XL, XXL



CARE® Design

Englandsvej 8
5700 Svendborg-DK
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: caredesign@caredesign.dk
www.caredesign.dk

Badblöjor / simblöjor - Care Design artikelnummer: Swim-Med

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Principle Business Enterprises.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktnamn: Swim-Med

Tillverkare: Principle Business Enterprises:

20189 Pine Lake Road, Bowling Green, OH 43402, P.O. Box 129 Dunbridge, OH 43414, USA

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

1. Produktbeskrivning

Swim-Med är en badblöja för personer med inkontinens. Produkten är utvecklad för användning vid simning och vattenaktiviteter och har till syfte att minska risken för oavsiktligt läckage av urin och avföring under vistelse i vatten.

Det finns en barriär på utsidan som säkerställer att badblöjan inte absorberar vätska utifrån och därför inte ökar sin volym under vattenaktiviteter.

Det finns en blå kant i midjan som visar att det är baksidan av badblöjan.

Latexfri. Kan användas av både män och kvinnor.

2. Avsedd användning

Swim-Med används som badblöja vid:

- Simning
- Vattenrening
- Vistelse i simhall eller liknande miljöer

Ökar tryggheten under vattenaktivitet, eftersom badblöjan säkerställer att varken urin eller avföring kan komma ut i vattnet.

Skyddar badkläderna, som rekommenderas att användas utanpå badblöjan.

Produkten används av:

- Barn och vuxna med inkontinens
- Användare med eller utan assistans från anhöriga eller vårdpersonal

3. Indikationer

Swim-Med är indicerad för personer med urin- och avföringsinkontinens som vill delta i vattenaktiviteter på ett hygieniskt och värdigt sätt.

4. Kontraindikationer och begränsningar

- Produkten är inte avsedd att användas som ersättning för inkontinensprodukter utanför vatten.
- Får inte användas vid öppna sår eller hudinfektioner i det täckta området utan föregående bedömning.
- Produkten är inte avsedd för kontinuerlig användning utanför vattenaktiviteter.

5. Bruksanvisning

5.1 Före användning

- Kontrollera att Swim-Med är intakt och utan synliga skador.
- Välj rätt storlek för att säkerställa optimal passform och täthet.
- Se till att produkten är ren och torr före användning.

5.2 Påtagning

- Ta på Swim-Med som en vanlig byxblöja eller underbyxor.
- Se till att elastikerna i midja och ben sitter tätt, men komfortabelt.
- Kontrollera att produkten sluter korrekt mot kroppen utan veck.

5.3 Under användning

- Produkten ska bäras under hela vistelsen i vatten.
- Vid obehag eller felaktig passform ska användningen upphöra och produkten justeras eller bytas ut.
- Tillsyn rekommenderas vid användning hos barn eller personer med nedsatt funktionsförmåga.

5.4 Efter användning

- Ta bort Swim-Med omedelbart efter vattenaktivitet.
- Swim-Med är en engångsbadblöja och ska därför kasseras efter avslutad vattenaktivitet.
- Kasseras som vanligt restavfall.

6. Rengöring och underhåll

- Swim-Med är en engångsbadblöja och ska därför kasseras efter avslutad vattenaktivitet.
- Kasseras som vanligt restavfall.
- Därför krävs ingen rengöring eller underhåll.

7. Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd alltid rätt storlek för att säkerställa täthet och funktion.
- Produkten får inte användas om den är skadad eller sliten.
- Swim-Med minskar risken för läckage, men kan inte garantera fullständig täthet under alla förhållanden.
- Får endast användas för den avsedda användning som beskrivs i denna bruksanvisning.